

	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm																											
<p>Nylon Com Agulha Sutura Cirúrgica Não Absorvível</p> <p>Farmacopéia Dos Estados Unidos Da America (U.S.P.). Farmacopéia Brasileira.</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-size: small;">ATM / ME / 516 Revisão B / 2014</p> <p style="text-align: right;">CE 1011</p>	<p style="text-align: center;">P</p> <p style="text-align: center;">Português</p> <p style="text-align: center;">Nylon Com Agulha Sutura Cirúrgica Não Absorvível</p> <p>Descrição A Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® é uma sutura não absorvível, monofilamento estéril, feita de poliamida alifática 6 ou 6.6. A Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® nas cores azul ou preto tem sido tingida utilizando corantes autorizados para dispositivos médicos. A Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® cumpre todos os requisitos estabelecidos pela Farmacopéia Brasileira, a Farmacopéia dos Estados Unidos da América (U.S.P.) e a Farmacopéia Européia (E.P.) para Sutures Não Absorvíveis.</p> <p>Indicações A Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® está indicada para usar-se na aproximação ou ligação de tecidos suaves em geral, incluindo os procedimentos de micro cirurgias, tecido neural e oftalmologia. O monofilamento de cor preta esta disponível nos calibres mais finos visto que sua alta visibilidade favorece os procedimentos cirúrgicos em neurocirurgia, assim como os de cirurgia microvascular.</p> <p>Efeitos Quando a Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® se aplica ao tecido, apresenta-se uma mínima reação inflamatória tissular, característica de corpo estranho seguida de uma lenta formação de tecido fibroso conectivo ao redor da sutura. Mesmo quando a Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® não é absorvida pelo tecido aonde se aplica, a hidrólise progressiva do monofilamento de nylon in vivo dá lugar a uma perda de sua resistência à tensão não maior que 20% ao ano.</p> <p>Contra-indicações Devido à perda gradual in vivo de sua resistência à tensão, a Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® não deve ser usada em procedimentos cirúrgicos que requerem a retenção permanente das propriedades de resistência à tensão da sutura, tais como nos procedimentos de enxertos vasculares sintéticos.</p> <p>Advertências Produto De Uso Único - Proibido Reprocessar Não reesterilize. O conteúdo deste pacote há sido esterilizado. Descarte o conteúdo deste pacote em caso de que o encontre aberto. Descarte as suturas e o material do pacote que não utilize no momento.</p>	<p>O usuário deverá estar familiarizado com os procedimentos e técnicas cirúrgicas aplicáveis para suturas não absorvíveis antes de aplicar este produto. Isto é importante devido ao risco de deiscência da ferida e a formação de novo tecido depende da região de aplicação e do tipo e calibre da sutura utilizada. Ao suturar, deve-se ter cuidado para evitar danificar a agulha cirúrgica enquanto é utilizada. Segure a agulha na área compreendida entre o terço e a metade da distância entre o extremo da união do fio com a agulha e sua ponta. Se segurar perto da ponta, se poderá prejudicar a integridade funcional da agulha ou quebrá-la. Se segurar pela zona da união com o fio de sutura, poderia se romper o corpo da agulha ou a própria sutura na zona da união com o fio. Quando se altera a configuração das agulhas, pode-se provocar uma diminuição de sua resistência ao dobrar e assim quebrar-se</p> <p>Condições de Armazenagem Temperatura entre 15-30°C (288-303°K), umidade relativa não superior a 65%, em local seco protegido de a luz solar.</p> <p>Precauções Como para qualquer outro tipo de sutura, deve-se ter cuidado no seu manuseio para evitar danos tanto na sutura como no tecido em que se aplica. Se dever ter maior cuidado quando se utiliza com material cirúrgico tal como fórceps ou porta agulha devido à possibilidade de que com eles se produza um amassamento ou enrugamento da sutura monofilamento. Para a segurança do nó se requer aplicar a técnica cirúrgica Pradão como requerem as circunstâncias cirúrgicas e a experiência do cirurgião. Não utilizar após a data de validade.</p> <p>Instruções de Uso O uso deste produto deverá estar de acordo com os procedimentos e técnicas cirúrgicas aceitáveis utilizadas para suturas não absorvíveis, levando em consideração o lugar de aplicação.</p> <p>Reações Adversas Estas podem incluir as seguintes: deiscência da ferida, perda gradual e completa da resistência à tensão, maior propensão a infecção bacteriana, mínima reação inflamatória tissular aguda, dor, edema transitório, e enrijecimento do tecido na área de aplicação da sutura.</p> <p>Apresentação do Produto A Sutura Cirúrgica Nylon Com Agulha Atramat® esta disponível nas seguintes apresentações: • Caixa com 12, 24 ou 36 envelopes com suturas, com 1 ou 2 agulhas, em calibres 2 aos 11-0 (U.S.P.).</p> <p>As suturas apresentam-se em diversos comprimentos de fio e</p>	<p>vários calibres de agulha. Data de validade 5 anos a partir da data de fabricação indicada na caixa.</p> <p>Simbologia Internacional</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Não reesterilizar</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Código de Lote</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Certificação Européia</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Exp: Valido até</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Produto estéril</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Mfg: Data de fabricação</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Fabricado por:</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Óxido de etileno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Raios gama</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td>Consultar as instruções de uso</td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Não reutilizar</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"></td> <td>Não utilizar se a embalagem estiver danificada</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Reg. ANVISA Nº 80160840028</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Planta México: INTERNACIONAL FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. México Carreteraco No. 44, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, 04040 México Teléfono: (52 55) 5484 17 00 - Fax: (52 55) 5549 42 34 atencion.cliente@atramat.com custom.care@atramat.com www.atramat.com</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Planta Lerma: Círculo de la Industria Poniente Lote 10-C, Col. Parque Industrial El Cerrillo, C.P. 52000. Lerma, Edo. de México. Teléfono: (52-728) 285 30 36 - Fax: (52-728) 285 3918</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Importado e distribuído por: ATRAMAT DO BRASIL LTDA Av. dos Imigrantes, 1770 - Jd América, Bragança Paulista, SP - Brasil, CEP 12902-000. CNPJ 04.959.710/0001-50 SAC 0800 773-3337 Tel. +55 (11) 4481-7777 Fax +55 (11) 4032-7707 www.atramat.com.br atramat@atramat.com.br Farmacêutico Responsável: Beatriz Virginia Garracini Maga CRF-SP 14.069</p>		Não reesterilizar		Código de Lote		Certificação Européia		Exp: Valido até		Produto estéril		Mfg: Data de fabricação		Fabricado por:		Óxido de etileno				Raios gama		Consultar as instruções de uso		Não reutilizar				Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reesterilizar		Código de Lote																												
	Certificação Européia		Exp: Valido até																												
	Produto estéril		Mfg: Data de fabricação																												
	Fabricado por:		Óxido de etileno																												
			Raios gama																												
	Consultar as instruções de uso		Não reutilizar																												
			Não utilizar se a embalagem estiver danificada																												