

	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm																								
105 mm	<p><b>Polipropileno</b> Sutura Cirúrgica Não Absorvível</p> <p>Farmacopéia dos Estados Unidos da America (U.S.P.) Farmacopéia Brasileira.</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">ATR / ME / 518 Revisión B / 2014</p> <p style="text-align: right;"><b>CE</b> 1011</p> <p style="text-align: right;"><b>Atramat</b> Innovate in medical devices</p>	<p style="text-align: center;"><b>P</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Polipropileno</b> Sutura Cirúrgica Não Absorvível</p> <p style="text-align: right;">Português</p> <p><b>Descrição</b> A Sutura Cirúrgica de monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> está feita de um estereó isômero isotático do homopolímero de polipropileno, tingido mediante um corante autorizado para dispositivos médicos, o qual lhe confere sua cor azul característico. Este fio para sutura cirúrgica cumpre com todos os parâmetros da Farmacopéia Brasileira, da Farmacopéia dos Estados Unidos da América (U.S.P.) e a Farmacopéia Européia (E.P.). Na Sutura Cirúrgica de monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> a relação entre o diâmetro do fio - agulha praticamente é o mesmo; muito conveniente para anastomoses vascular, não existe filtração. A dureza Rockwell da agulha que se encastoa é mais alta que as das agulhas convencionais, o que permite uma excelente penetração facilitando a passagem em tecidos calcificados ou placas ateroscleróticas. A Sutura Cirúrgica de monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> para uso cardiovascular tem uma alta resistência à flexão repetida, sendo esta a capacidade do fio ao dobrar-se continuamente sem chegar a fadiga de flexão, suportando assim, a propulsão do coração. A Sutura Cirúrgica de monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> tem características especiais, mesmas que cumprem com as mais altas especificações internacionais, as quais cumprem com grande segurança em procedimentos em Cirurgia Cardiovascular como são: revascularização coronária troca de válvulas cardíacas aórtica, mitral e tricúspide, amplamente utilizadas no tratamento das cardiopatias congênitas assim como em cirurgias vasculares periféricas. Em algumas apresentações o produto esta disponível com almofadas de teflon cirúrgicas (pledget) de PTFE; com dimensões ideais para brindar suporte em anéis vasculares (uma das características importantes em relação com as almofadas de teflon (pledget) é que não se desprende nenhuma partícula do teflon, evitando assim o possível ingresso de algum corpo estranho dentro da cavidade cardíaca).</p> <p><b>Indicações</b> A Sutura Cirúrgica de monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> está indicada para uso geral em aproximações e/ou ligações de tecidos suaves, incluindo nas especialidades Cardiovascular, Microvascular, Cirurgia Geral, Cirurgia Gastro, Ginecologia, Obstetria, Cirurgia Plástica e Reconstructiva, Oftalmologia.</p> <p><b>Contra-indicações</b> Não existem contra-indicações conhecidas para este produto.</p> <p><b>Efeitos</b> A Sutura Cirúrgica monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> provoca uma moderada reação tissular, seguida de uma formação</p>	<p>gradual de tecido fibroso conectivo ao redor da sutura. A sutura não é absorvida nem apresenta diminuição alguma na sua resistência à tração, pois é inerte à ação enzimática dos tecidos. A Sutura Cirúrgica de monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> é resistente ao contato de tecidos com infecção microbiana e é utilizada com êxito em feridas contaminadas ou infectadas minimizando a formação de nódulos ou deiscência da ferida. Devido a que não se adere aos tecidos, a sutura pode-se retirar facilmente, diminuindo assim o trauma tissular.</p> <p><b>Advertências</b> <b>Produto de Uso Único - Proibido Reprocessar</b> Não reesterilize. O conteúdo deste pacote há sido esterilizado. Descarte o conteúdo deste pacote em caso de que o encontre aberto. Descarte o fio cirúrgico não utilizado. Em qualquer caso de corpo estranho, na presença de contaminação bacteriana, esta sutura pode promover a infecção bacteriana. Deverão seguir as práticas cirúrgicas seguras para a drenagem e fechamento das feridas contaminadas ou infectadas. Ao suturar, se deve ter cuidado para evitar danificar a agulha cirúrgica enquanto é utilizada. Segure a agulha na área compreendida entre o terço e a metade da distância entre o extremo da união do fio com a agulha e sua ponta. Se segurar perto da ponta, se poderá prejudicar a integridade funcional da agulha ou quebrá-la. Se segurar pela zona da união com o fio de sutura, poderia se romper o corpo da agulha ou a própria sutura na zona da união com o fio. Quando se altera a configuração das agulhas, pode-se provocar uma diminuição de sua resistência ao dobrar e assim quebrar-se.</p> <p><b>Condições de Armazenagem</b> Temperatura entre 15-30°C (288-303°K), umidade relativa no superior a 65%, em local seco protegido de a luz solar.</p> <p><b>Precauções</b> Como para qualquer outro tipo de sutura, deve-se ter cuidado no seu manuseio para evitar danos tanto na sutura como no tecido em que se aplica. Se dever ter maior cuidado quando se utiliza com material cirúrgico tal como fórceps ou porta-agulha devido à possibilidade de que com eles se produza um amassamento ou corrugação da sutura monofilamento. Para a segurança do nó, se requer aplicar a técnica cirúrgica padrão como requeiram as circunstancia cirúrgicas e a experiência do cirurgião. Não utilizar após a data de validade.</p> <p><b>Instruções de Uso</b> A utilização deste produto deverá estar de acordo com aos procedimentos e técnicas cirúrgicas aplicáveis para Sutures Monofilamento Não Absorvíveis, levando em consideração a área de aplicação.</p> <p><b>Reações Adversas</b> Estas podem incluir as seguintes: deiscência da ferida, infecção, uma moderada reação tissular e irritação local transitória mínima na região da ferida.</p>	<p><b>Apresentação do Produto</b> A Sutura Cirúrgica de monofilamento de <b>Polipropileno Atramat®</b> esta disponível nas seguintes apresentações: • Caixa com 12, 24 ou 36 envelopes com suturas de 1 ou 2 agulhas nos calibres 2 aos 10-0 (U.S.P.). • Almofada de teflon (pledget) em apresentação individual em calibres 2 aos 10-0 (U.S.P.). As suturas se apresentam em diversos comprimentos de fio e vários calibres de agulha.</p> <p><b>Data de Validade</b> 5 anos a partir da data de fabricação indicada na caixa.</p> <p><b>Simbologia Internacional</b></p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Não reesterilizar</td> <td></td> <td>Código de Lote</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Certificação Européia</td> <td></td> <td>Exp: Valido até</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produto estéril</td> <td></td> <td>Mfg: Data de fabricação</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fabricado por:</td> <td></td> <td>Oxido de etileno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Consultar as instruções de uso</td> <td></td> <td>Não reutilizar</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Não utilizar se a embalagem estiver danificada</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Reg. ANVISA Nº 80160840018</p> <p style="text-align: center;"><b>Planta México:</b> Internacional Farmacéutica, S.A. de C.V. MÉXICO Carreteraco No. 44, Col. Parque San Andrés, Coyoacán, 04040 Teléfono: (52 55) 5484 17 00 - Fax: (52 55) 5549 42 34 www.ifsa.com.mx atencion.cliente@atramat.com custom.care@atramat.com</p> <p style="text-align: center;"><b>Planta Lerma:</b> Circuito de la Industria Poniente Lote 10-C. Col. Parque Industrial El Cerrillo, C.P. 52000. Lerma, Edo. de México. Teléfono: (52-728) 285 30 36 - Fax: (52-728) 285 3918</p> <p style="text-align: center;"><b>Importado e distribuído por:</b> <b>Atramat do Brasil Ltda.</b> 12902-000 Av. dos Imigrantes, 1770 – JD América, Bragança Paulista, SP - Brasil, CEP CNPJ 04.995.710/0001-50 SAC 0800 773-3337 Tel. +55 (11) 4481-7777 Fax +55 (11) 4032-7707 www.atramat.com.br atramat@atramat.com.br Farmacêutico Responsável: Beatriz Virginia Garracini Maga CRF-SP 14.069</p>		Não reesterilizar		Código de Lote		Certificação Européia		Exp: Valido até		Produto estéril		Mfg: Data de fabricação		Fabricado por:		Oxido de etileno		Consultar as instruções de uso		Não reutilizar				Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reesterilizar		Código de Lote																									
	Certificação Européia		Exp: Valido até																									
	Produto estéril		Mfg: Data de fabricação																									
	Fabricado por:		Oxido de etileno																									
	Consultar as instruções de uso		Não reutilizar																									
			Não utilizar se a embalagem estiver danificada																									